





Protocolo Cirúrgico

POSIÇÃO DE INSTALAÇÃO DO IMPLANTE

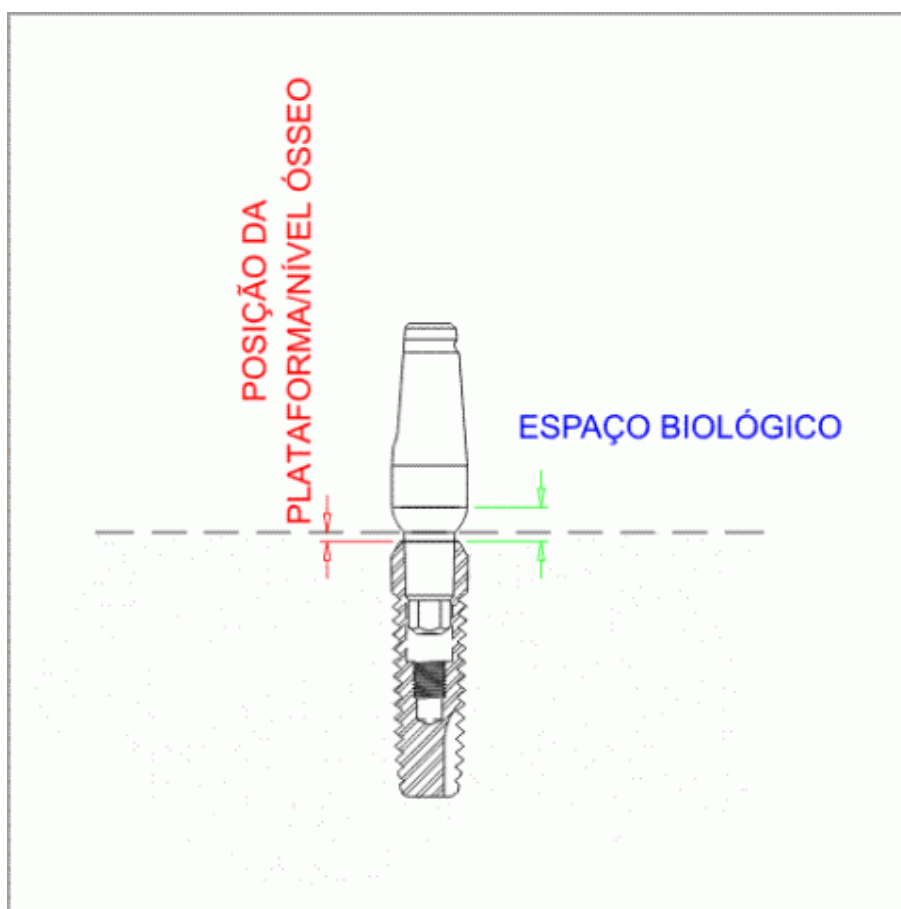

Em regiões onde se requer mais estética, a plataforma do implante deve ser instalado 02mm abaixo da **margem óssea**, para se permitir um perfil de emergência mais adequado e respeito ao espaço biológico.


Devemos sempre instalar o implante de maior diâmetro e comprimento que o osso permitir.

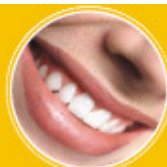

Nossos implantes podem ser utilizados em qualquer tipo ósseo.

SEQUÊNCIA DE BROCAS

Lança, 02mm e piloto para todos os tipos. A broca escareadora deve ser utilizada levando-se em consideração a posição da plataforma e quantidade da parede cortical cervical. CUIDADO com osso muito duro para não danificar o sextavado interno. A experiência e seqüência certa de brocas é muito importante e pode ser modificada em osso pouco denso.

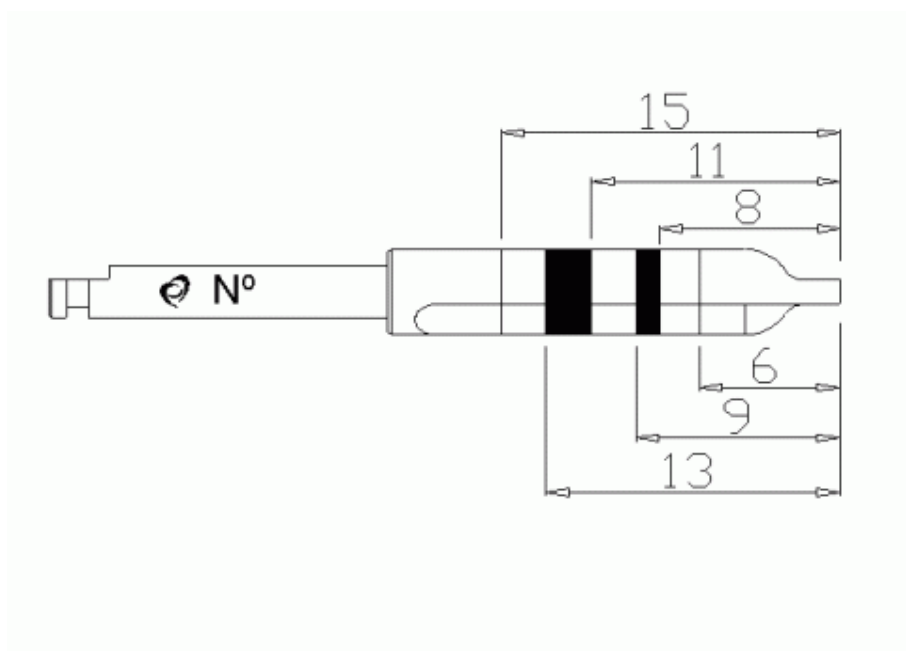

Implante 3.3	Broca 2.8
Implante 3.75	Broca 3.0 para osso mole ou 3.3 para osso duro
Implante 4.3	Broca 3.3 para osso mole ou broca 3.8 osso duro
Implante 5.0	Broca 4.3
Implante 5.5	Broca 4.8



ESTABILIDADE INICIAL

A Estabilidade inicial é necessária para osseointegração.

Em osso pouco denso é necessário subinstrumentar para que o implante obtenha esta estabilidade.